

SHERASCANSPRAY

MODE D'EMPLOI

1. Indication

Spray de scannage pour utilisation extra orale en CAD/CAM. Empêche les reflets des surfaces pour l'enregistrement des modèles par le scan.

2. Contenance

- Spray de 200 ml,
- 1 vaporisateur avec buse oblique pour usage incliné,
- 1 vaporisateur avec buse droite pour usage à plat.

3. Utilisation

- La surface à vaporiser doit être propre et sèche.
- Appliquer sur la flacon le vaporisateur approprié.
- Bien secouer le flacon un court instant avant chaque usage.
- Pendant la vaporisation: maintenir le flacon verticalement.
- Presser toujours complètement sur le vaporisateur pour éviter une obstruction de la buse.
- Vaporiser la surface finement à env. ca. 5 – 8 cm.
- Pour obtenir une couche fine et intégrale de la surface grâce à des vaporisations les plus courtes possibles.
- Attendre le séchage du spray avant de scanner.
- Après la prise en charge par le scan, rincer la surface à l'eau et à la vapeur.

4. Recommandation de prudence

Le récipient est sous pression. Protéger des rayons du soleil et des températures supérieures à 50°C. Même après utilisation complète, ne pas tenter d'ouvrir violemment le flacon ou de le brûler. Ne pas vaporiser vers une flamme ou une zone incandescente. Maintenir éloigner des sources d'inflammation, ne pas fumer. Stocker hors de portée des enfants.

5. Garantie

SHERA Werkstoff-Technologie GmbH est certifié EN ISO 13485 et garantit une première qualité à ses produits, grâce aux contrôles effectués en permanence à tous les stades de la production. Nos modes d'emploi se basent sur les valeurs indicatives déterminées dans notre laboratoire d'essai. Ces valeurs ne peuvent être garanties que si les étapes indiquées sont respectées. L'utilisateur est seul responsable de la façon dont il emploie les produits. Nous ne pouvons être tenus responsables de résultats insatisfaisants, étant donné que nous n'avons aucune influence sur la mise en oeuvre des produits. Les demandes de dommages et intérêts, qui toutefois peuvent éventuellement survenir, se limitent uniquement à la valeur commerciale de nos produits.

